


# PANSEMENT AUTO ADHESIF AU TEPEZCOHUITE NE COLLE PAS A LA PLAIE



## MODE D'EMPLOI :

(Après soins appropriés)

- Découper à la main 10 à 15 cm de gaze (1)
- Enlever les deux films protecteurs (2)
- Pincer la bande sur elle-même afin de la fixer autour du doigt (3)
- Enrouler la bande en spirales (4)
- Rouler le bord du bandage afin de former une bague de fixation et rabattre le gaze du bout du doigt sur elle-même (5)
- Pour d'autres types de blessures : plier la gaze en plusieurs épaisseurs afin d'obtenir une compresse, et utiliser un fixateur (6)

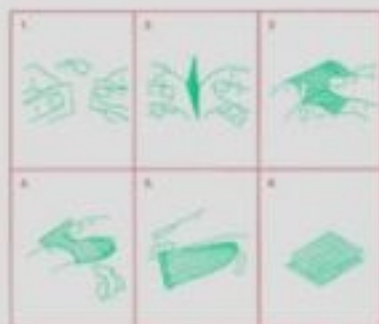

SOINS DE PREMIÈRE URGENGE

REF. 597750 AMD BANDAGE AUTO-ADHESIF 5CM\*2M